

Мту Файли для повторної обробки



VDW®

**Endo
Easy
Efficient®**



Інструкція із застосування

Інструменти для повторної обробки Mtu 15/.05 та 25/.05

Рекомендована швидкість 280 об/хв (rpm)

Макс. крутний момент 15/.05 30 г/см (gcm) (0,3 Нм (Ncm))

Макс. крутний момент 25/.05 120 г/см (gcm) (1,2 Нм (Ncm))

Mtwo® direct: R1/05 Setting A. R25/05 Setting C.

- Відкрийте устя каналу за допомогою бора Гейтс-Глідден або ультразвукового інструменту та видаліть гутаперчевий штифт з коронкової частини. При необхідності розм'якшіть гутаперчевий штифт за допомогою розчинника (наприклад, евкаліптової олії).
- Помістіть кінчик інструменту для розпломбування на гутаперчевий штифт і обертайте. Mtu Файли для повторної обробки мають ріжучий кінчик, щоб

інструмент міг легко просуватися в гутаперчевий штифт без додаткового тиску.

- Використовуйте Мту Файли для повторної обробки без надмірного натискання.
- Круговими рухами поступово видаліть вміст кореневого каналу.
- За допомогою ручного інструменту (наприклад, С-Пілот файл) розміром ISO 08 визначте повну робочу довжину кореневого каналу.
- Після визначення повної робочої довжини каналу до верхівки кореня за допомогою невеликого, гнучкого ручного інструменту розширте кореневий канал до розміру ISO 15 по всій робочій довжині.
- Продовжуйте розширення каналу звичайними інструментами Мту, поки не буде досягнуто потрібного розміру.












Приклад:

Mtwo[®] (Мту) R15/05 або Mtwo[®] (Мту) R25/05, ручні інструменти розмірами ISO 08, ISO 10, ISO 15, Mtwo[®] (Мту) 10/04, Mtwo[®] (Мту) 15/05, Mtwo[®] (Мту) 20/06, Mtwo[®] (Мту) 25/06 тощо.

Для безпечного використання рекомендується застосовувати NiTi (HiTi) інструменти лише один раз. Завжди перевіряйте інструменти на наявність ознак зносу. Згідно загальних рекомендацій використовуйте Мту Файли для повторної обробки в 3-4 каналах, якщо гутаперчевий штифт важко видалити, і в 6-8 каналах, якщо гутаперчевий штифт видаляється легко.

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 05.2020

Пояснення символів зазначених на маркуванні

	Номер за каталогом		Номер партії
	Ознайомлення з інструкцією із використання		Використати до
	Стерилізовано за допомогою випромінювання		Знак CE з номером органу з сертифікації
	Не використовуйте, якщо упаковка пошкоджена	0123	
	Можна автоклаувати		Знак відповідності з номером назначеного органу з оцінки відповідності
	Вміст (зазначена кількості)	UA.TR.116	Виробник
			

CE
0123



ВДВ ГмбХ
Байервальдштрасе 15,
81737 Мюнхен, Німеччина
VDW GmbH
Bayerwaldstraße 15, 81737
München, Germany

Уповноважений представник в Україні:
Представництво «Дентсплай Лімітед»
Юридична адреса: 01004 м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 9/2, оф.40, Україна
Фактична адреса: 03038 м. Київ,
вул. Нововокзальна, 2, Україна
Тел.: 044-594-56-04
Електронна пошта:
Lyudmila.Kuzmenko@dentsplysirona.com



UA.TR.116