

## Штифти паперові РЕСПРОК Інформація щодо застосування

**Опис виробу, призначення для застосування, умови зберігання, стерилізація, термін зберігання, протипоказання, попередження, запобіжні заходи та побічні явища**



### Опис виробу:

Штифти паперові РЕСПРОК виготовлені з паперу з високим ступенем абсорбції, без сполучних речовин або хімічних речовин. Вони відрізняються високою точністю розмірів і мають ISO-кольорові кінці.

Ці паперові штифти доступні в розмірах ISO 025, 040 і 050, всі вони мають довжину 29 мм (mm).

Штифти паперові РЕСПРОК стерилізовані гамма-випромінюванням і упаковані в блістерні комірки по 4 паперових штифта. Маркування довжини в 18, 20 і 22 мм (mm) допомагає контролювати робочу довжину. Штифти паперові РЕСПРОК зберігають хорошу консистенцію матеріалу при повному насиченні.

Розміри і фізичні якості, які вимагаються відповідно до ISO 7551 “Стоматологічні абсорбуючі штифти”, - строго дотримуються вимоги щодо відсутності сполучних речовин, хімічних, лікарських або дезінфікуючих добавок, біологічно нейтральна поведінка.

### Передбачуване використання:

Штифти паперові використовуються для просушування кореневих каналів. Подальші області застосування - це зупинка крововиливів з медикаментами або без них, взяття проб заражених ділянок та нанесення антисептичних та дезінфікуючих розчинів на периапікальну тканину.

**Умови зберігання:** Зберігати в сухому та прохолодному місці.

**Стерилізація:** за допомогою гамма-випромінювання, згідно ISO 11137-Стерилізація

**Термін придатності:** Термін зберігання стерильних паперових штифтів становить 5 років.

**Протипоказання:** Відсутні.

**Попередження:** Відсутні.

**Запобіжні заходи:** Відсутні.

**Побічні явища:** Відсутні.

### Пояснення символів зазначених на маркуванні



Номер за каталогом



Повторно  
використовувати  
ЗАБОРОНЕНО



Стерилізовано за  
допомогою випромінювання



Номер партії



Використати до



Знак СЕ з номером органу з  
сертифікації  
0123



Вміст (зазначена  
кількості)



Берегти від вологи



Знак відповідності з номером  
назначеного органу з оцінки  
відповідності



Виробник



ВДВ ГмбХ  
Байервальдштрассе 15, 81737  
Мюнхен, Німеччина  
VDW GmbH  
Bayerwaldstraße 15, 81737  
München, Germany

**Уповноважений представник в Україні:**

Представництво «Дентсплай Лімітед»

Юридична адреса: 01004 м. Київ,  
вул. Велика Васильківська, 9/2, оф.40,  
Україна

Фактична адреса: 03038 м. Київ,  
вул. Нововокзальна, 2, Україна

Тел.: 044-594-56-04

Електронна пошта:

[Lyudmila.Kuzmenko@dentsplysirona.com](mailto:Lyudmila.Kuzmenko@dentsplysirona.com)

